


Gebrauchsanweisung beachten



sensipo®

**Das praktische Bidet für den Anal- und Intimbereich.
Rein mit Wasser sanft abduschen, natürlich reinigen
und frisch fühlen.**

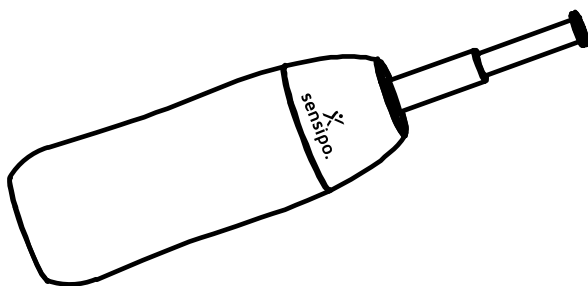

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

danke, dass Sie sich für sensipo® entschieden haben. sensipo® ist ein ideales Produkt zur einfachen hygienischen Reinigung und Pflege des sensiblen Anal- sowie Intimbereichs und für ein frisches Gefühl. Reduzieren Sie empfindliche Reizungen durch eine sanfte Dusche mit purem Wasser. Geeignet zur natürlichen und sanften Reinigung, nach dem Stuhlgang, zur allgemeinen Intimhygiene, Frauenhygiene sowie während und nach einer Schwangerschaft. Praktisch zu Hause und unterwegs.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Produkts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an entsprechendes Fachpersonal wie z.B. Ärzte, Hebammen, Apotheker oder direkt an uns.

nexsana

Wozu wird sensipo® angewendet?

sensipo® ist ein Bidet im handlichen Miniformat zur einfachen hygienischen Reinigung und Pflege des sensiblen Anal- sowie Intimbereichs und für ein frisches Gefühl.


Reduzieren Sie empfindliche Reizungen durch eine sanfte Dusche mit purem Wasser. Geeignet zur natürlichen und sanften Reinigung, nach dem Stuhlgang, zur allgemeinen Intimhygiene, Frauenhygiene sowie während und nach einer Schwangerschaft. Auch einsetzbar während der Menstruation. Die natürliche und sanfte Dusche mit Wasser kann auch bei Kindern sowie pflegebedürftigen Menschen empfohlen werden.

Nutzen Sie sensipo® zur täglichen Intimerfrischung für mehr Wohlgefühl, ob zu Hause oder einfach unterwegs, als Alternative zu Feuchttüchern und regulieren Sie damit Ihren ganz persönlichen Toilettenpapierverbrauch.


Für den täglichen Einsatz geeignet. Kombinieren Sie sensipo® mit anderen geeigneten Produkten von nexsana.

Wie wird sensipo® angewendet?


Stellen Sie vor jeder Anwendung sicher, dass sensipo® vollständig entleert und sauber ist. Bitte beachten Sie folgende Schritte zur Anwendung sowie die weiteren Anwendungshinweise.

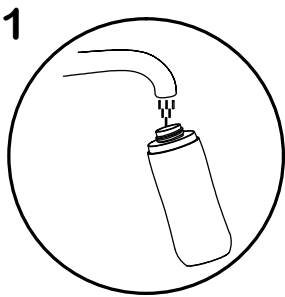


sensipo® mit sauberem, kaltem bis lauwarmem Wasser befüllen und Deckel wieder aufdrehen.

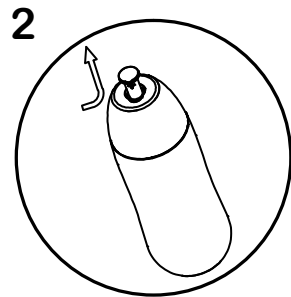


Sprühkopf aus dem Deckel des Bidets an der Einkerbung herausziehen.

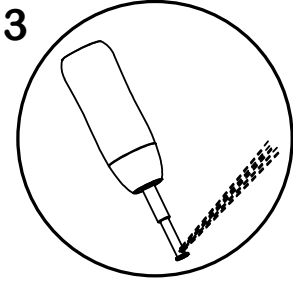


In Sitzposition auf der Toilette, in der Dusche oder Badewanne anwenden. Zum Abduschen zusammendrücken.

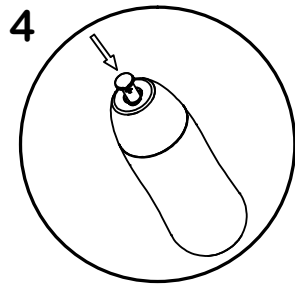

Nach Anwendung optional den Sprühkopf wieder hineindrücken. Gereinigte Stelle sanft abtupfen.

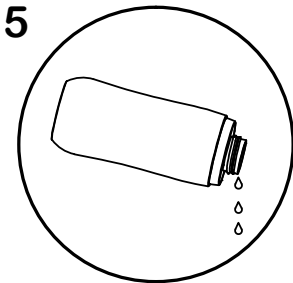

Restliche Flüssigkeit vollständig entfernen und abtrocknen lassen.

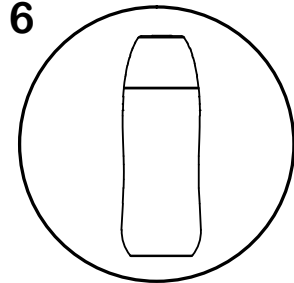

sensipo[®] regelmäßig vor oder nach einer Anwendung reinigen.

Wichtige Anwendungshinweise:

Reinigen Sie sensipo[®] regelmäßig vor oder nach einer Anwendung gründlich mit einer Seifenlösung oder milden Waschlotion. Leeren Sie den restlichen Inhalt nach der Anwendung vollständig aus und lassen Sie restliche Flüssigkeit bis zur Trocknung entweichen. Nicht auskochen. Nicht in der Mikrowelle erhitzen. Führen Sie sensipo[®] nicht in Körperöffnungen ein. Verwenden Sie sensipo[®] nur für den beschriebenen Anwendungszweck.

Besondere Hinweise:

Eine sanfte, natürliche Pflege des empfindlichen Anal- und Intimbereichs kann Erkrankungen vorbeugen. Suchen Sie z.B. bei Schmerzen, Juckreiz oder anderen auffälligen Blutungen unbedingt Ihren Arzt auf. Eine rechtzeitige Erkennung von Erkrankungen erhöht die Heilungschance.

Aufbewahrungshinweise:

Produkt sorgfältig aufbewahren.
Vor Kindern sichern.

Inhalt:

Bidet (300 ml) mit Sprühfunktion und Gebrauchsanweisung.

sensipo®

nexsana GmbH

Windheckenweg 79, 53902 Bad Münstereifel
Deutschland

Telefon: +49 2253 93 999 41

Fax: +49 2253 93 999 93

E-Mail: service@nexsana.de

Internet:

www.sensipo.shop

www.nexsana.de

